

AED（自動体外式除細動器） Automated External Defibrillator

JPAD

ジェイパッドCU-SP1 AED



心臓突然死の原因のひとつである心室細動(VF)と呼ばれる不整脈により、心臓が細かくけいれんを起こして、心臓のポンプ機能が十分に動かなくなった状態に、電気ショックを与えることで元の心臓ポンプ機能を取り戻させるための医療機器です。AEDは、心電図を自動的に分析し、音声ガイダンスやイラスト表示により適切な指示をしてくれますので、一般の人でも簡単に使うことができるよう設計されています。

一刻を争う救命のために、
使いやすさを追求しました。

「ジェイパッドCU-SP1」が選ばれる理由

理由1

迷わず素早く使える操作性

1 本体表面だけで全ての操作が可能
オールインワン・デザイン

本体の表面に操作ボタンや表示ディスプレイが全てレイアウトされているので、バイスタンダー（救急現場に居合わせた人）にも分かりやすく、使いやすいデザインになっています。

2 成人・小児のモード切替はワンタッチ
モード切替え

成人・小児のモード切替は、スライドスイッチによりワンタッチで簡単にできます。誤操作防止用のカバーもついています。



3 成人・小児のパッド交換は不要
両用電極パッド

成人用、小児用として、どちらにも使用できる両用パッドを標準で本体に収納しています。両用パッドなので、成人用、小児用で交換の必要がなく、ランニングコストにも貢献します。



理由2

聞き取りやすく分かりやすいガイダンス

4 周りの騒音に合わせて
音声ガイダンスの音量を自動調節
オートボリューム **業界初**

周囲の環境の騒音に対応して、救命音声ガイダンスの音量が自動的に3段階上昇する自動音量調整機能がついています。騒がしい場所で音声ガイダンスが聞こえないなどの状況を防ぎます。

5 音声ガイダンスとイラスト表示で
心臓蘇生の手順を案内
ガイド機能

救命音声ガイダンスに合わせて、心臓蘇生(CPR)の操作手順がすぐに分かるイラストガイド表示機能がついています。



各番号の機能については、「理由1・2・3」をご覧ください。



本体裏面

！ 日常点検を忘れずに！

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

理由3


点検・管理も簡単・確実

6 セルフチェックの結果を一目で確認
ステータスインジケータ

機器本体、バッテリー、電極パッドのセルフチェック結果を、視認性に優れた3つのステータスインジケータで表示します。キャリングケースの上からでも、正常な状態とエラー状態が一目で確認出来るので、管理も簡単です。



7 SDカードが使用可能
救命データ管理

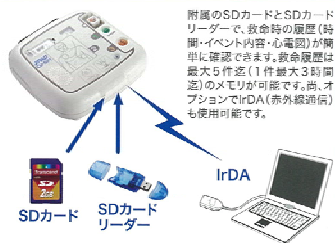

付属のSDカードとSDカードリーダーで、救命時の履歴（時間・イベント内容・心電図）が簡単に確認できます。救命履歴は最大5件（1件最大3時間経過）のメモリが可能です。Wi-Fi、オプションでIrDA（赤外線通信）も使用可能です。

8 長く使えるから経済的
長寿命バッテリー搭載

本体に搭載してから、スタンバイ状態で5年という長寿命バッテリーを搭載しています。長寿命なので、ランニングコストにも貢献します。

仕 様

販 売 名	ジェイパッドCU-SP1	メ モ リ 機 能	5件のデータ保存が可能（1件、3時間、最大15時間のイベント情報・ECG情報） PC転送（SDカード、赤外線通信）
一 般 的 名 称	半自動除細動器	ガ イ ド 機 能	3つのインジケータ（フラッシュライト機能付きイラスト表示）と、CPRコーテイング機能
電 極	両用電極パッド（成人・小児、兼用1回限りの使い捨て）	モ ー ド 切 替	成人・小児モード切替スイッチ（セーフティガード付）
出力エネルギー	定格150J（成人：負荷50Ωで公称150J） 小児：負荷50Ωで公称50J	ス テ ー タ ス イ ン ジ ケ ー タ	3つのステータスが確認できるLCD画面 【電極パッド期限、バッテリー残量、機器のエラー状態】
波 形	二相性波形（e-cub Biphase）波形パラメータは、 傷病者の胸郭インピーダンスの負荷に応じて自動調整	IP:55 (IEC60529)	粉塵が内部に侵入することを防止、いかなる方向からの 水の直接噴流によっても有害な影響を受けない
バ ッ テ リ	DC12V4.2A長寿命使い捨てバッテリー（ディスポーザブルLiMnO ₂ バッテリー）	品 番	SP1-JSP1
バ ッ テ リ 容 量	スタンバイ状態5年以上、電気ショック200回以上	医療機器承認番号	22500BZX00338A01
セ ル フ テ ス ト	毎日、毎週、4週毎、電源ON時、バッテリー装着時 （バッテリー残量、電極パッド、内部回路、等）	ク ラ ス 分 類	高度管理医療機器、特定保守管理医療機器
寸 法 ・ 質 量	260×256×69.5(W×L×Hmm)、2.4kg（バッテリー含む）		

AEDに関するお問い合わせはこちら

☎ 03-3288-5953